

Incidin™ Pro



Solution concentrée pour un nettoyage et une désinfection rapides et efficaces.

Liquide concentré pour le nettoyage et la désinfection.

Avec sa formule SMART-BALANCED, Incidin™ Pro établit des nouveaux standards dans le domaine du nettoyage et de la désinfection professionnelle des surfaces.

- Votre Pro pour l'efficacité
- Votre Pro pour la rapidité
- Votre Pro pour la tolérance

LARGE SPECTRE D'ACTION

Incidin Pro est efficace contre les bactéries, les levures et différents virus (y compris les norovirus). Il convient aux zones à haut risque et à une grande variété de surfaces, des infirmeries générales et des zones publiques aux salles d'opération et aux unités de soins intensifs.

EXCELLENTE EFFICACITÉ DE NETTOYAGE ET COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX

Il a été testé de manière approfondie sur tous les types de surfaces couramment utilisés dans le secteur de la santé - des métaux, du linoléum et du PVC à la céramique, au caoutchouc et au plastique - avec d'excellents résultats.

FORMULATION SANS ALDÉHYDE, SANS PARFUM NI COLORANT

La formulation non volatile, sans colorant ni parfum, assure une application agréable du produit.



Incidin™ Pro

Liquide concentré pour le nettoyage et la désinfection.



Incidin™ Pro
2 L Flaçon



Incidin™ Pro
6 L Bidon

Caractéristiques du produit

- Le liquide est clair, incolore à jaune clair
- pH du produit pur à 20°C : env. 11,0
- valeur du pH en cas de dilution avec de l'eau du robinet (0,5%) : env. 9,5
- valeur du pH en cas de dilution avec de l'eau du robinet (2,0%) : env. 10
- Densité à 20°C : 1,01 g/ml
- Indice de réfraction : 1,385

Propriétés microbiologiques

Efficacité	Concentration (%) / (ml/L)	Temps d'action
Bactéricide selon EN 13727 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Levurozide selon EN 13624 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Tuberculocide et mycobactéricide selon EN 14348	1,5% / 15	60 min*
Virucide limité selon EN 14476 (Adenovirus - Norovirus)	2,0% / 20 1,0% / 10	30 min* 60 min*
Efficace contre les norovirus selon EN 14476	1,5% / 15	30 min*
Efficace contre les virus enveloppés selon EN 14476	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 30 min*

*Charge élevée

Informations de commande

Produit	Unité de conditionnement	N° d'article
Incidin™ Pro	3x2L Flaçon	3148468
Incidin™ Pro	6L Bidon	3140908



Domaine d'application

dispositif médical : liquide concentré pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs.

Biocide : pour les surfaces générales.

Mode d'emploi

6L: Diluer le concentré avec de l'eau (max. 60°C) jusqu'à la concentration souhaitée. Pour diluer, par exemple à une concentration de 0,5% (5ml/l), ajouter 40 ml à 8 litres d'eau. Appliquer mécaniquement (par ex. en essuyant) en quantité suffisante (+/- 30ml/m²). Respectez le temps de contact recommandé pour obtenir l'efficacité antimicrobienne requise.

2L: Diluez le concentré avec de l'eau (max. 60°C) jusqu'à la concentration souhaitée. Pour le diluer, par exemple à une concentration de 0,25% (2,5 ml/l) dans 8 litres, il suffit de retourner la bouteille une fois pour ajouter une dose de 20 ml, pour 0,5% (5ml/l) dans 8 litres retourne deux fois la bouteille pour ajouter deux doses de 20 ml (40 ml au total). Appliquer mécaniquement (par ex. en essuyant) en quantité suffisante (+/- 30ml/m²). Respectez le temps de contact recommandé pour obtenir l'efficacité antimicrobienne requise.

Ingrédients

100 g contiennent : 10,0 g de 2-phénoxyéthanol (CAS-Nr. 122-99-6), 8,0 g de N-(3-aminopropyl)-Diamino. N-dodécylpropane-1,3-diamine (diamine) (n° CAS 2372-82-9) et 7,5 g d'alkyl (C12-16) -diamino. chlorure de diméthylbenzylammonium (ADBAC/ BKC (C12-C16)) (no CAS 68424-85-1).

Stockage

Entre 0°C et +25°C.

À stocker dans un local frais, sec et à l'abri du soleil.

Utiliser les dispositifs médicaux et les biocides en toute sécurité

Veillez toujours lire les conseils et les informations figurant sur l'étiquette et la fiche technique du produit.



PRODUIT BIOCIDES POUR LA DESINFECTION DES SURFACES (GROUPE 1 - PT2).
UNIQUEMENT POUR L'USAGE PROFESSIONNEL.

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH

Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

www.ecolab.com



CE
0297

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™