

Incidin™ Alcohol Wipe



Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Schnell wirkende, gebrauchsfertige Desinfektionstücher

Die Kombination eines breiten Wirkspektrums, kurzer Einwirkzeiten und einer rückstandsfreien Anwendung macht Incidin Alcohol Wipe ideal für den Einsatz in allen Gesundheitseinrichtungen.

Incidin™ Alcohol Wipe:

- Breites Wirkspektrum, einschließlich Norovirus, kombiniert mit kurzen Kontaktzeiten
- Hochwertiges, strukturiertes Tuchmaterial für eine effiziente Anwendung
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen
- Farbstoff- und parfümfrei



Incidin™ Alcohol Wipe

Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Vorteile von Incidin™ Alcohol Wipes

Breites Wirkspektrum inkl. Norovirus-Wirksamkeit bei kurzen

Einwirkzeiten: Breites Wirkspektrum für den Einsatz in der täglichen Routine und bei Ausbrüchen, kombiniert mit kurzen Einwirkzeiten, die eine schnelle Desinfektion gewährleisten. Wirksamkeit praxisnah anhand der aus dem Tuch freigesetzten Lösung bestätigt.

Anwenderfreundlich: vorgetränkte Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion, keine Vorbereitung erforderlich, erhältlich im Flowpack.

Breite Materialverträglichkeit: Hervorragende Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen im gesamten Gesundheitsbereich.

Mikrobiologische Eigenschaften

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Bakterizid nach EN 13727 / EN 16615	1 min*/**
Levurozid nach EN 13624 / EN 16615	1 min*/**
Tuberkulozid/ Mykobakterizid nach EN 14348 / EN 16615	1 min*/**
Begrenzt viruzid Plus gemäß EN 14476	5 min*/**
Begrenzt viruzid gemäß EN 14476	30 sec*/**
Viruzid wirksam gegen Rotavirus gemäß EN 14476	30 sec**
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 mit Mechanik (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	5 min*/**
Begrenzt viruzid****	30 sec***
Begrenzt viruzid Plus****	10 min***
Wirksam gegen Rotavirus****	30 sec***

* hohe Belastung **niedrige Belastung ***DVG 2015 (Suspensionstest) **** Gemäß RKI Empfehlung 10/2022

Verpackungs- und Bestellinformation

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ Alcohol Wipe	6 x 100 Wipes Flowpack (20x20 cm)	3092600



Anwendungsbereich

Medizinprodukt: Schnell wirkendes, gebrauchsfertiges Desinfektionstuch für nicht-invasive Medizinprodukte.

Biozid: für allgemeine Oberflächen (PT2).

Gebrauchsanweisung

Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen abwischen und komplett benetzen.

Wischtuch nicht wiederverwenden:

Die Desinfektion kann nicht mehr gewährleistet werden. Beachten Sie die angegebenen Einwirkzeiten und Bedingungen für die erforderliche Wirksamkeit. Schließen Sie den Deckel nach Gebrauch. Prüfen Sie vor Gebrauch die Oberfläche auf Alkoholempfindlichkeit.

Medizinprodukte: Bitte konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers für die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten. Jedes schwerwiegende Vorkommnis in Bezug auf das Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats unverzüglich gemeldet werden.

Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen:
2 Monate.

Wirkstoffe

In 100g Tränklösung sind enthalten:
35g 2-Propanol (CAS N°67-63-0),
25g 1-Propanol (CAS N° 71-23-8).

Lagerung

Produkt in der Originalverpackung zwischen 0°C und 25°C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Biozide und Medizinprodukte vorsichtig verwenden

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH

Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz



ECOLAB EUROPE

Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zürich
Schweiz



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

