



ALKOHOLISCHE SCHNELLEDESINFEKTION

Incidin™ Liquid

GEBRAUCHSFERTIGE LÖSUNG ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLEDESINFEKTION

Incidin™ Liquid mit breitem Wirkspektrum, einschließlich Tuberkulose und Norovirus.

Incidin™ Liquid bietet zudem:

- Kurze Einwirkzeiten
- Duft- und Farbstofffreie Formulierung
- Exzellente Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Flächen
- Kompatibel im Incidin Dry Wipes System



Incidin™ Liquid

GEBRAUCHSFERTIGE LÖSUNG ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLEDESINFEKTION

BREITES WIRKSPEKTRUM BEI KURZEN EINWIRKZEITEN

Incidin Liquid mit breitem Wirkspektrum und kurzen Einwirkzeiten auch für den Intensivpflegebereich und andere Hochrisikobereiche geeignet.

ANWENDERFREUNDLICH

Hohe Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen gewährleistet Incidin™ Liquid den zuverlässigen Einsatz für alle Anwendungsbereiche.

DUFT- UND FARBSTOFFFREI

Die Duft- und farbstofffreie Formulierung von Incidin Liquid hinterlässt keine Wirkstoffrückstände und gewährleistet eine bequeme Produktanwendung.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

WIRKSAMKEIT	EINWIRKZEIT
Bakterizid nach EN 13727 (30sek.) / EN 16615 (1min.)	1 min**
Levurozid nach EN 13624 (30sek.) / EN 16615 (1min.)	1 min**
Tuberkulozid nach EN 14348 / EN 16615	1 min**
Begrenzt viruzid gemäß EN 14476	30 sek**
Begrenzt viruzid Plus gemäß EN 14476 (Adenovirus - 1min, Norovirus - 30sek.)	1 min**
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015, mit und ohne Mechanik (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	5 min
Begrenzt viruzid Plus ****	10 min***
Begrenzt viruzid ****	30 sek***
Viruzid wirksam gegen Rotavirus	30 sek***

niedrige Belastung * DVV 2015 (Suspensionstest) **** Gemäß RKI Empfehlung 10/2022

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ Liquid Falsche	12 x 1 L	30 962 20 PZN 07503098
Incidin™ Liquid Kanister	2 x 5 L	30 963 00 PZN 07503081

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ANWENDUNGSBEREICH



Gebrauchsfertiges Desinfektionslösung für nicht-invasive Medizinprodukte.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1L Flasche:

Reinigen Sie die Oberfläche im Voraus. Oberfläche aus ca. 30cm einsprühen, mit einem sauberen Tuch abwischen und trocknen lassen. Alternativ das Produkt auf ein sauberes Tuch auftragen, die Oberfläche vollständig abwischen und trocknen lassen. Die Oberfläche vollständig benetzen. Die angegebene Einwirkzeit für die erforderliche mikrobiologische Wirksamkeit beachten.

Medizinprodukte: Ein Abspülen ist nicht erforderlich, es sei denn, die zu behandelnden Flächen sollen mit Haut oder Schleimhaut in Berührung kommen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers bezüglich der Aufbereitung von Medizinprodukten. Prüfen Sie vor der Anwendung die Kompatibilität der alkoholempfindlichen Oberflächen.

Jeder schwerwiegende Vorfall der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, soll dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden.

5L Kanister:

Reinigen Sie die Oberfläche im Voraus. Das Produkt auf ein sauberes Tuch auftragen, z.B. INCIDIN DRY WIPES SYSTEM (Informationen zum Vorbereiten der Dry Wipes werden auf der Verpackung gegeben), die Oberfläche vollständig abwischen und trocknen lassen. Oberfläche vollständig benetzen. Die angegebene Einwirkzeit für die erforderliche mikrobiologische Wirksamkeit beachten. Medizinprodukte: Ein Abspülen ist nicht erforderlich, es sei denn, die zu behandelnden Flächen sollen mit Haut oder Schleimhaut in Berührung kommen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers bezüglich der Aufbereitung von Medizinprodukten. Prüfen Sie vor der Anwendung die Kompatibilität der alkoholempfindlichen Oberflächen.

Jeder schwerwiegende Vorfall der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, soll dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden.

WIRKSTOFFE

100g enthalten: 35g Propan-2-ol (CAS N° 67-63-0), 25g Propan-1-ol (CAS N° 71-23-8).

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung zwischen 0 und 25 °C kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH