

Sekusept™ MultiEnzyme



Manuelle Vorreinigung von Medizinprodukten inklusive flexibler Endoskope

Eine gründliche Reinigung medizinischer Instrumente und Endoskope ist die Grundvoraussetzung für eine effektive Desinfektion.

Die optimal abgestimmte Kombination von Enzymen mit Tensiden und weiteren Inhaltsstoffen von Sekusept MultiEnzyme bietet eine exzellente Reinigungsleistung für alle möglichen medizinischen Instrumente inklusive flexibler Endoskope.

Sekusept MultiEnzyme ist auch:

- Materiaverträglich dank des neutralen pH Werts
- Zeitsparend, da eine Nachreinigung vermieden wird
- Wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration



Sekusept™ MultiEnzyme

Enzymatische Vorreinigung von medizinischen Instrumenten inklusive flexibler Endoskope



Sekusept MultiEnzyme
2 Liter Kanister



Sekusept MultiEnzyme
6 Liter Kanister

Schnell

Sekusept MultiEnzyme bietet eine effiziente und gründliche Reinigung. Diese hilft die Zeit für die Reinigung zu verringern und vermeidet die Nachreinigung.

Einfach

Sekusept MultiEnzyme besteht aus einer einzigartigen Kombination von Tensiden sowie den Enzymen Protease, Lipase und Amylase, die die Aaufspaltung von Proteinen, Fetten und Stärke unterstützen. Die Formulierung ermöglicht einfaches Abspülen und sorgt für eine gute Sichtbarkeit der Instrumente. Die transparente blaue Farbe zeigt an, wenn das Produkt hinzugefügt wurde.

Wirtschaftlich

Sekusept MultiEnzyme kann in niedriger Konzentration von 0,3% (3 mL/L) bis 2% (20 mL/L) für 10 Minuten eingesetzt werden. So kommt weniger chemisches Produkt während der Reinigung zum Einsatz.

Bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sekusept MultiEnzyme Kanister	1 x 6 Liter	3046640
Sekusept MultiEnzyme Kanister	4 x 2 Liter	3046620

Anwendungsbereich

Enzymatisches Reinigungsmittel für alle Arten von medizinischen Instrumenten einschließlich flexibler Endoskope. Auch für die Verwendung in Ultraschallbädern geeignet.

Gebrauchsanweisung

Je nach Art und Grad der Verschmutzung eine Anwendungslösung von 0,3% (3 mL/L) - 2% (20 mL/L) mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität ansetzen. Instrumente einlegen, dabei auf vollständige Benetzung achten. Instrumente unter Berücksichtigung der Herstelleranweisung reinigen, einschließlich geeigneter mechanischer Maßnahmen (z. B. Bürsten). Bei Verwendung in einem Ultraschallbad (Kontaktzeit mindestens 5 Minuten) während der Beschallung abgedeckt halten.

Mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen. Bei der manuellen Endoskopaußbereitung die Außenflächen, Hohlräume und Kanäle abtrocknen, um eine Verdünnung der im nächsten Schritt verwendeten Desinfektionslösung zu vermeiden. Zur Enddesinfektion entsprechend aufbereiten. Während des gesamten Vorgangs geeignete Handschuhe und Gesichtsschutz tragen.

Inhaltsstoffe

Nichtionische Tensid, Korrosionsinhibitoren, Lösungsmittel, Enzymkomplex, Konservierungsmittel, Hilfsstoffe.

Lagerung

Gefahrgut - beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

Gutachten

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

Sichere Verwendung von Medizinprodukten

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Schweiz



ECOLAB EUROPE GmbH
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zurich
Schweiz



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™